



BD バキュテイナ® 採血管

生化学検査／免疫血清学検査用

BD バキュテイナ® SST™ 採血管 Serum Separation Tube

血液の凝固を促進するシリカ微粒子、および血餅付着防止用シリコンが塗布された血清分離剤入り採血管です。分離剤入り採血管を利用することで測定前処理の簡易化(血清分離、輸送)、ダイレクトサンプリングによる測定、および測定後検体保存を可能にするなど検査業務の効率化が期待できます。

13mm	転倒混和回数 5回	凝固時間 30分	遠心条件(×g) 1100-1300×g	遠心時間 10分
16mm	転倒混和回数 5回	凝固時間 30分	遠心条件(×g) 1000-1300×g	遠心時間 10分



Q & A

Q 分離剤のメカニズムを教えてください。

A 分離剤は、機械的な力を加えると粘度が下がりゾル状(流動性がある状態)に変化し、機械的な力を取り除くとゲル状(流動性がなくなる状態)に戻ります。分離剤の比重は、血清と血餅の中間に調整されており、遠心分離後に血清・血漿と血餅・血球の間に管底に充填された分離剤が移動して、両者を物理的に遮断します。

キャップ形状	BD ヘモガード™ 閉鎖機構キャップ付き					コンベンショナル
包装単位 100本						
カタログ番号	367979	367983	367968	367986	367989	367988
キャップカラー	■ 青／赤	■ 黄／赤				■ 赤・黒
採血量 (mL)	3	3.5		5		8.5
外径×長さ (mm)	13×100	13×75		13×100		16×100
管容量 (mL)	7	5		7		10
ラベル	透明ラベル	紙ラベル	透明ラベル	紙ラベル	透明ラベル	紙ラベル
添加剤	血清分離剤(ポリエステルゲル)／凝固促進用シリカ微粒子					
材質	プラスチック					
JD コード	555452408	555452255	555620258	555452279	555452309	555452293

BD バキュテイナ® 採血管

生化学検査／免疫血清学検査用

BD バキュテイナ® SST™ II 採血管 Serum Separation Tube II

血液の凝固を促進するシリカ微粒子、および管壁への血餅付着防止用シリコンが塗布された血清分離剤入り採血管です。また、分離剤が適度に傾斜をつけて添加されており、遠心時に血餅成分と血清をより効果的に分けることができます。

転倒混和回数
6回

凝固時間
30分

遠心条件(×g)
1300-2000×g

遠心時間
10分



キャップ形状	BD ヘモガード™ 閉鎖機構キャップ付き					コンベンショナル
包装単位 100本						
カタログ番号	365920	367955	368640	367953	367528	368972
キャップカラー	■ 黄／赤					■ 赤
採血量 (mL)	3.5	5		8.5		
外径×長さ (mm)	13×75	13×100		16×100		
管容量 (mL)	5	7		10		
ラベル	透明ラベル	紙ラベル	透明ラベル	紙ラベル	透明ラベル	
添加剤	血清分離剤 (アクリル樹脂ゲル) / 凝固促進用シリカ微粒子					
材質	プラスチック					
JD コード	555303915	555620500	555620685	555300327	555620548	555620531

販売名：BD バキュテイナ採血管 医療機器認証番号：219AFBZX00109000

BD バキュテイナ® 採血管

生化学検査／免疫血清学検査用

BD バキュテイナ® プレイン採血管

血液の凝固を促進するシリカ微粒子、および血餅付着防止用シリコンが塗布された血清分離用採血管です。

転倒混和回数
5回

凝固時間
60分

遠心条件(Xg)
≤1300Xg

遠心時間
10分



	プレイン採血管					ディスクード採血管 (捨血用)	
キャップ形状	BD ヘモガード™ 閉鎖機構キャップ付き				コンベンショナル	BD ヘモガード™ 閉鎖機構キャップ付き	
包装単位 100本							
カタログ番号	365904	367814	367815	367819	365905	366703	
キャップカラー	■ 赤 / 灰				■ 赤	□ 透明 / 赤	
採血量 (mL)	4	5	6		10	3	
外径×長さ (mm)	13×75	13×100			16×100	13×75	
管容量 (mL)	5	7			10	5	
ラベル	透明ラベル	紙ラベル		透明ラベル		紙ラベル	
添加剤	凝固促進用シリカ微粒子					なし	
材質	プラスチック						
JD コード	555304097	555452729	555452170	555452187	555304103	555397082	

販売名：BD バキュテイナ採血管 医療機器認証番号：219AFBZX00109000