



BD Parata InspectRx™

Système d'inspection de sachets

Nous savons à quel point **le processus de vérification** est important pour votre flux de travail. Étant l'un des derniers points de contrôle de l'exactitude, il n'y a pas de place à l'erreur, ce qui signifie que la vérification des ordonnances peut être fastidieuse et chronophage. L'automatisation de l'inspection de vos sachets augmente l'efficacité, ce qui vous donne la tranquillité d'esprit et le temps de vous concentrer sur d'autres activités génératrices de revenus.



Augmentez votre responsabilité

BD Parata InspectRx™ offre une solution évolutive de vérification des sachets qui utilise une caméra d'analyse à spectre multiple pour inspecter chaque pilule par rapport à une base de données auto-entretenue assurant l'exactitude.

Fonctions principales

- Trois modèles de vitesse de traitement
 - Inspecte 24 - 2 400 sachets/h.
 - Inspecte 36 - 3 600 sachets/h.
 - Inspecte 54 - 5 400 sachets/h.
- L'imagerie de référence en temps réel simplifie la maintenance de la base de données
- La station de correction facilite la correction et la consignation des sachets à corriger.
- Permet de récupérer facilement les images et de produire rapidement des rapports sur les statistiques de production.

Inspection électronique

Les images sont analysées à l'aide d'une base de données auto-entretenue afin d'inspecter 12 caractéristiques des médicaments dans chaque sachet :

Surface, Distance au centre, Longueur, Largeur, Contour, Arrondi, Couleur (R, V, B), Couleur : écart-type (R, V, B)

Les indicateurs de couleur sur l'écran permettent de trier visuellement les sachets afin d'améliorer le flux de travail.

3/3	1	1	1
-3	-1	-1	-1
Modulation name	Bar 19	Tu. Tu.	BUPT1919 20mg
Quantity	1	1	1
Damaged	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Twisted	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Too soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Too hard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Too many	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicateurs de couleur

Vert foncé = correct

Vert clair = vérifié, correct

Jaune = suspect

Rouge = vérifié, incorrect

Bleu = sachet actuel sélectionné pour inspection

* L'impression de barres de couleurs ne peut pas être validée électroniquement par BD Parata InspectRx™

BD Parata InspectRx™

Fonction	Caractéristiques
Taille	190,5 cm (75 po) (l) × 66,0 cm (26 po) (P) × 144,8 cm (57 po) (H) 284,5 cm (112 po) (l) × 66,04 cm (26 po) (P) × 144,8 cm (57 po) (H) (collecteur inclus)
Poids	374 lb 814 lb (collecteur inclus)
Rapidité	Inspecte 24 - 2 400 sachets/h. Inspecte 36 - 3 600 sachets/h. Inspecte 54 - 5 400 sachets/h.
Source d'alimentation	120 V, 60 Hz 12 A et mise à la terre



Complétez votre processus

- L'unité de collection fonctionne avec BD Parata InspectRx™ pour séparer les sachets par patient, par médicament ou par cabinet médical.
- Coupe, roule et sécurise les sachets en les déposant dans le bac pour la livraison.
- Dimensions : 94 cm (37 po) (l) × 66 cm (26 po) (P) × 124,5 cm (49 po) H (collecteur seulement)



BD – Canada, Mississauga (Ontario) L5N 0B3

bd.com

BD, le logo BD et Parata InspectRx sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2024 BD. Tous droits réservés. BD-115281 (0224)

